

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘT KHÔ BICARBONATE CHO CHẠY THẬN NHÂN TẠO

CHUNG LOẠI:

- INSPRACART
- INSPRABAG

THÀNH PHẦN:

Natri Bicarbonate (NaHCO_3).

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ TÁC DỤNG:

Bột khô bicarbonate chạy thận nhân tạo được sử dụng để điều trị chạy thận nhân tạo bằng cách pha loãng thích hợp với dung dịch thẩm phân máu đậm đặc axit và nước tinh khiết. Dung dịch chạy thận nhân tạo sau pha loãng dùng để thay thế chất điện giải, độc tố, chất lỏng trong máu thông qua quả lọc (màng bán thấm) mà không tiếp xúc trực tiếp với máu, từ đó tạo nên sự cân bằng điện giải cho bệnh nhân.

Sản phẩm được đựng trong hộp chứa polypropylen (Inspracart) hoặc túi đựng polyethylene (Insprabag) cho phép sản xuất ra dung dịch thẩm phân bicarbonate ngay tại thời điểm điều trị. Khi được gắn vào một giá đỡ đặc biệt, nước sẽ đi vào trong hộp/túi bột, sau đó tạo ra dung dịch bicarbonate bão hòa, sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch đậm đặc này được pha theo tỷ lệ trong máy lọc máu. Mỗi 84 gam natri bicarbonate cho phép thu được 25-28 lít dung dịch cơ bản sau khi pha loãng.

CHỈ ĐỊNH:

Suy thận cấp và mãn tính, nhiễm độc, mất cân bằng axit-bazơ và điện giải.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Tăng kali máu

Bệnh đông máu kháng trị

Những bệnh nhân có huyết động không ổn định có thể chỉ định một phương pháp điều trị chức năng thận thay thế khác.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Hộp/Túi bột khô bicarbonate chạy thận nhân tạo được gắn vào máy chạy thận nhân tạo. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh nhiễm khuẩn.

Sản phẩm phải được sử dụng dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Nếu có tác dụng không mong muốn, cần được tư vấn y tế. Tránh xa trẻ em và giữ nguyên bao bì cho tới khi sử dụng. Khi bao bì đã mở phải sử dụng sản phẩm trong 24 giờ. Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng hoặc không đáng tin cậy. Cần đeo găng tay trong quá trình sử dụng.

TÁC DỤNG PHỤ:

Có thể xảy ra buồn nôn, nôn mửa hoặc chuột rút. Do đó, việc sử dụng sản phẩm phải dưới sự kiểm soát của bác sĩ. Đối với bất kỳ tác dụng nào hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ:

Sản phẩm phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng (5°C - 30°C) và tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ sản phẩm trong bao bì kín nắp. Bột khô bicarbonate chạy thận nhân tạo có ngày hết hạn và nên được sử dụng trước ngày này được ghi trên nhãn. Thời hạn sử dụng là 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI:

Sản phẩm có hai hình thức với các loại trọng lượng khác nhau

Hộp Inspacart: 550g, 650g, 720g, 750g, 760g, 850g, 920g, 960g

Túi Insprabag: 650g, 840g, 900g

CÁC BIỂU TƯỢNG:

Biểu tượng	Giải thích
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng
	Tránh ánh nắng trực tiếp
	Không tái sử dụng
	Giới hạn nhiệt độ (5°C - 30°C)
	Lô/ Số Lô
	Sản xuất bởi
	Không tiệt trùng
	Ngày sản xuất
	Ngày hết hạn
	Đại diện Châu Âu
	Đăng ký CE

CƠ SỞ SẢN XUẤT

Inspramed Medikal San. ve Tic. A.Ş

Serbest Bölge, 8.Cad, No:29,38070, Melikgazi, Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ

Tel : +90 352 311 42 10 (pbx)

Fax : +90 352 311 42 20

E-mail : commercial@inspramed.com.tr

Web : www.inspramed.com.tr