

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG MÁY THẬN

Nhãn hiệu/Chủng loại: INSPEDEZ C.M.L 2,5

THÀNH PHẦN

Bao gồm các thành phần sau phù hợp với tiêu chuẩn được điển Châu Âu và Mỹ (Ph.Eur và USP.)

Thành phần	Số CAS	Tỷ lệ %
Axit Citric Monohydrat	5949-29-1	21 %
Axit Malic	6915-15-7	2,5 %
Axit Lactic	79-33-4	2,5 %
Nước tinh khiết	7732-18-5	Còn lại

CHỈ ĐỊNH:

Inspradez C.M.L 2,5 cung cấp khả năng làm sạch, khử trùng và khử cặn (loại bỏ canxi cacbonat) bằng khử trùng nhiệt hóa học trong một quy trình.

Inspradez C.M.L 2,5 khi pha loãng theo tỷ lệ 1/24 sẽ có tác dụng như sau:

- Diệt khuẩn (Được xác minh theo EN 13727),
- Diệt nấm (Được xác minh theo EN 13624) nếu sử dụng ở 37°C và 5 phút.
- Diệt lao (Được xác minh theo EN 14348),
- Diệt virus* (Được xác minh theo EN 14476, bao gồm HIV/HBV/HCV) khi sử dụng ở 20°C và 60 phút

Sản phẩm được bơm tự động theo chương trình khử trùng của máy chạy thận nhân tạo. Chọn một chương trình thích hợp cho cả khử trùng và khử cặn. Nếu không có chương trình khử trùng trong máy chạy thận nhân tạo, việc rửa hệ thống khép kín phải được thực hiện bằng R.O. nước sau quá trình khử trùng.

Hình thức : Trong suốt, không màu

Mùi : Không mùi

Trạng thái vật lý : Chất lỏng

Độ hòa tan : Hoàn toàn

Vị : Vị axit

pH : 1.00 - 2.00

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Inspradez C.M.L 2,5 chỉ được sử dụng để khử trùng và khử canxi trong máy chạy thận nhân tạo. Nó không thể được sử dụng để chữa bệnh. Tránh xa tầm tay trẻ em

Phải được sử dụng với găng tay trong quá trình ứng dụng.

Tránh tiếp xúc với da và mắt. Rửa bằng nhiều nước nếu xảy ra tiếp xúc.

Nên sử dụng sản phẩm trong vòng 2 tháng kể từ khi mở nắp.

* hiệu quả chống lại virus Vaccinia chưa được khẳng định.

ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ: 5°C -30°C

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI: Can polyethylene (HDPE) loại 5 và 10 lít.

HẠN SỬ DỤNG : 02 năm

CÁC BIỂU TƯỢNG:

Biểu tượng	Giải thích
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng
	Tránh ánh nắng trực tiếp
	Không tái sử dụng
	Giới hạn nhiệt độ (5°C - 30°C)
	Lô/ Số Lô
	Sản xuất bởi
	Không tiệt trùng
	Ngày sản xuất
	Ngày hết hạn
	Đại diện Châu Âu
	Đăng ký CE
	Tính ăn mòn

❖ CƠ SỞ SẢN XUẤT

Inspramed Medikal San. ve Tic. A.Ş

Serbest Bölge, 8.Cad, No:29,38070, Melikgazi, Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ

Tel : +90 352 311 42 10 (pbx)

Fax : +90 352 311 42 20

E-mail : commercial@inspramed.com.tr

Web : www.inspramed.com.tr